



1. ABRIR

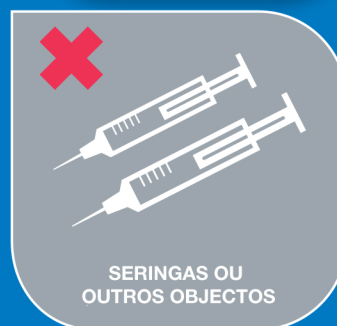


2. CARREGAR



3. FECHAR

INTUITIVA, SEGURA E FÁCIL DE MANUSEAR - MÍNIMA FORMAÇÃO NECESSÁRIA

PRODUTOS DE
PASTA DE PAPELDEJECTOS
HUMANOSPAPEL HIGIÉNICO
E TOALHETES COMPATÍVEIS
COM MACERADORASPENSOS HIGIÉNICOS E
ABSORVENTES,
OU TOALHETES*LUVAS OU AVENTAIS
DE PLÁSTICOSERINGAS OU
OUTROS OBJECTOS

* TOALHETES COMPATÍVEIS COM MACERADORAS PODEM SER COLOCADOS NESTA MÁQUINA

AVISOS

1. Notifique o técnico se a máquina indicar uma luz vermelha contínua ou apresentar funcionamento defeituoso.
2. NÃO COLOQUE pensos higiénicos ou absorventes, luvas, roupas, peças metálicas, etc. que poderão danificar a máquina.
3. Limpe apenas com água morna com sabão. Desinfecte com desinfetante não corrosivo, de acordo com as instruções de segurança de uso de químicos.

**Haigh Macifresh**
Criado exclusivamente
para a Quattro**HAIGH**
Bugban[®]
ACTIVE
ANTIMICROBIAL
BUILT IN

Como Usar a Quattro

Consulte o painel indicador na face frontal.

Quando a luz verde estiver iluminada no botão de abrir... **Abrir, Carregar, Fechar**



1. **Abra** a tampa pressionando o botão azul, de libertação da tampa

1. **Carregue** a máquina:

Carga **MÁXIMA** para esta máquina:

Arrastadeiras descartáveis - **4**

Urinois - **4**

Qualquer combinação dos produtos indicados acima - **4**

Bacias - 2



NÃO EXCEDA esta carga máxima

1. **Feche** a tampa. A tampa irá bloquear e a máquina iniciará o ciclo automático completo.

Assim que o ciclo terminar a tampa poderá ser aberta para a próxima operação.

Abertura mãos-livres

Quando equipada com o Kit Mãos-Livres, a Quattro poderá abrir a tampa pressionando, com o pé, no pedal ilustrado na imagem abaixo.

